

TEST ANFETAMINA EN ORINA, CASETE

40,85€ I.V.A. no incluido



Prueba rápida de membrana para la detección cualitativa de Anfetamina en orina humana.
Concentración mínima de 1,000 ng/mL.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

SKU: 265617DAM102

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test rápido de membrana para la detección cualitativa de Anfetamina en orina humana. Es un inmunoensayo cromatográfico para la detección de anfetamina en orina humana a una concentración del cut-off de 1.000 ng/mL. Detecta otros compuestos relacionados por lo que debe referirse a la tabla de Especificidad Analítica del prospecto.

Descargar IFU Test Barbitúricos Akratest

Principio

El test rápido en casete de anfetamina es un inmunoensayo cromatográfico basado en el principio de enlaces competitivos. La droga que pueda estar presente en la muestra de orina compite con los conjugados de la droga por los puntos de unión sobre el anticuerpo. Durante el test una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La anfetamina, si está presente en la muestra de orina por debajo de 1,000 ng/mL, no saturará los puntos de unión del anticuerpo, que capturarán los conjugados inmovilizados de la anfetamina y aparecerá una línea de color visible en la región del test. Esta línea de color, por contra, no aparecerá en la región del test si la concentración de anfetamina supera los 1,000 ng/mL porque saturará todos los puntos de unión del anticuerpo. Así, una muestra de orina positiva no generará una línea de color en la región del test debido a la competición de la droga, mientras que una muestra de orina negativa o con un contenido inferior al del cut-off generará una línea de color en la región del test. Para servir como procedimiento de control, siempre aparecerá una línea de color en la región de control, lo que indica que se ha añadido un volumen apropiado de muestra y la membrana ha funcionado correctamente.

Materiales Suministrados

- Pruebas en Casete
- Goteros
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[**DESCARGAR IFU TEST ANFETAMINA AKRATEST**](#)