

TEST CASETE ANTÍGENOS COVID-19 AG, MUESTRA NASOFARÍNGEA Y OROFARÍNGEA



Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de antígenos de nucleoproteínas virales del SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas y orofaríngeas humanas. Caja 20 tests

SKU: 243103N-20

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO. ÉSTE TEST NO ES UN TEST DE AUTODIAGNÓSTICO.

El test NADAL® COVID-19 Ag es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de antígenos de nucleoproteínas virales del SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas y orofaríngeas humanas. Indicado para el uso como ayuda en el diagnóstico de infecciones por el SARS-CoV-2.

Contenido incluido en el kit:

- 20 test casete
- 20 hisopos estériles
- 20 tubos extracción con tapas cuentagotas

- 2 botes búfer (7 ml cada uno). Contiene conservante azida sódica: <0,1 mg/mL
- 1 soporte para reactivos
- 1 manual instrucciones

Sensibilidad y especificidad de diagnóstico

El test NADAL® COVID-19 Ag se evaluó con muestras clínicas cuyo estado se confirmó mediante RT-PCR. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

	Positivo	Negativo	Total
Positivo	150	0	150
Negativo	37	161	198
Total	187	161	348

Sensibilidad de diagnóstico: 80,2% (73,9% - 85,3%)*

Especificidad de diagnóstico: >99,9% (97,7% - 100%)*

Concordancia general: 89,4% (85,7% - 92,2%)*

Sensibilidad para las muestras de PCR fuertemente positivas con un valor Ct de ≤ 30 es del 97,6% (93,1% - 99,2%)*

*95% de intervalo de confianza

SARS-COV-2

La COVID-19 (enfermedad del coronavirus) es la enfermedad infecciosa causada por el recientemente descubierto coronavirus SARS-CoV-2. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca, fatiga, producción de esputo, dificultad para respirar, dolor de garganta y dolor de cabeza.

Algunos pacientes pueden tener mialgia, escalofríos, náuseas, congestión nasal y diarrea. Estos síntomas comienzan gradualmente y son leves en la mayoría de los casos. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin un tratamiento especial. Aproximadamente una de cada seis personas que se infectan con la COVID-19 enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las personas mayores y las que tienen condiciones preexistentes como hipertensión, problemas cardíacos o diabetes, son más propensas a desarrollar enfermedades graves. Hasta ahora, alrededor del 2% de las personas infectadas han fallecido.

La COVID-19 se transmite a través de las gotitas respiratorias que exhalan las personas infectadas al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas pueden ser inhaladas o ingeridas directamente por otras personas o pueden contaminar superficies, que luego pueden ser infecciosas durante varios días. La mayoría de las estimaciones sobre el período de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, durante los cuales las personas podrían ser ya infecciosas sin mostrar síntomas de enfermedad.

