

TEST BENZODIAZEPINA 100 NG/ML EN ORINA, TIRAS

51,06€ I.V.A. no incluido



Prueba rápida en tiras para la detección cualitativa de Benzodiazepina en orina humana, con una concentración de corte de 100 ng/mL.

Presentación: Caja 50 tests

Marca: Akratest

SKU: 265617DBZ101

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba Rápida BZO en tira es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de Oxazepam (mayor metabolite) en orina humana, a una concentración de corte de 100 ng/mL. Esta prueba detectará otros compuestos relacionados, consulte la tabla de especificidad analítica en el IFU.

Este ensayo proporciona un resultado analítico preliminar cualitativo. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. Cromatografía de gases/la espectrometría de masas (GC/MS) es el método confirmatorio preferido. La consideración clínica y el juicio profesional deben aplicarse a cualquier droga de resultado de la prueba de abuso, particularmente cuando se usan resultados positivos preliminares.

[Descargar IFU Test Tiras Benzodiazepina Akratest](#)

Principio

La Prueba Rápida BZO en Tira (Orina) es un inmunoensayo cromatográfico rápida basado en el principio de uniones competitivas. La droga que puede estar presente en la muestra de orina compete frente al conjugado de la misma en los puntos de unión al anticuerpo.

Durante la prueba, la muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Si las Benzodiazepina están presentes en la orina en concentraciones inferiores a cut-off, no saturarán los puntos de unión de los anticuerpos. Las partículas recubiertas de anticuerpos serán capturadas por el conjugado inmovilizado de proteína-Benzodiazepina y una línea visible de color aparecerá en la zona de la prueba. Esta línea de color no se formará en la zona de la prueba si el nivel de Benzodiazepina está por encima de cut-off porque saturará todos los puntos de unión de los anticuerpos de anti-Benzodiazepina.

Una muestra de orina positiva no generará una línea coloreada en la zona de la prueba debido a la competencia de la droga, mientras que una muestra de orina negativa o una muestra con una concentración inferior a la del cut-off generará una línea en la zona de la prueba. Para servir como procedimiento de control, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control si la prueba ha sido realizada correctamente y con un volumen adecuado de muestra.

Materiales Suministrados

- Pruebas en tiras
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST BENZODIAZEPINA AKRATEST](#)