

TEST CANNABIS 50 NG/ML EN ORINA, CASETE

38,90€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida de membrana para detectar cualitativamente los niveles de cannabis (marihuana) en orina humana con concentración de corte de 50 ng/ml.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

SKU: 265617DTH102

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba Rápida de THC en Casete (Orina) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección de cannabis (marihuana) en orina humana a una concentración del cut-off de 50 ng/mL.

Este test proporciona solo un resultado analítico cualitativo preliminar. Debe emplearse un método químico más específico para obtener la confirmación del resultado. Los métodos de confirmación preferidos son la Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (GC/MS). Consideraciones clínicas

y juicio profesional deben aplicarse a cualquier resultado de un test de drogas de abuso, especialmente cuando se usan resultados positivos preliminares.

Descargar IFU Test Cannabis (Marihuana) Akratest

Principio

El test rápido en casete de cannabis (marihuana) es un inmunoensayo cromatográfico basado en el principio de enlaces competitivos. La droga que pueda estar presente en la muestra de orina compite con los conjugados de la droga por los puntos de unión sobre el anticuerpo. Durante el test una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La marihuana, si está presente en la muestra de orina por debajo de 50 ng/mL, no saturará los puntos de unión del anticuerpo, que capturarán los conjugados inmovilizados del THC y aparecerá una línea de color visible en la región del test. Esta línea de color, por contra, no aparecerá en la región del test si la concentración de marihuana supera los 50 ng/mL, porque saturará todos los puntos de unión de los anticuerpos. Así, una muestra de orina positiva no generará una línea de color en la región del test debido a la competición de la droga, mientras que una muestra de orina negativa o con un contenido inferior al del cut-off generará una línea de color en la región del test. Para servir como procedimiento de control, siempre aparecerá una línea de color en la región de control, lo que indica que se ha añadido un volumen apropiado de muestra y la membrana ha funcionado correctamente.

Materiales Suministrados

- Pruebas en casete
- Cuentagotas
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST CANNABIS \(MARIHUANA\) AKRATEST](#)