

Test Cocaína 300 ng/mL en orina, tiras

46,88€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida de tira reactiva para la detección cualitativa del metabolito de la cocaína en la orina humana, con una concentración de corte de 300 ng/mL.

Presentación: Caja 50 tests

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Prueba Rápida COC en Tira (Orina) un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del metabolito de la Cocaína, Benzoilecgonina, en orina humana para una concentración del cut-off de 300 ng/mL. Este test detecta también otros compuestos relacionados con la cocaína, para lo cual puede referirse a la relación que aparece en el apartado Especificidad. Ésta técnica únicamente proporciona un resultado analítico preliminar cualitativo. Para obtenerla confirmación de un resultado. Debe emplearse un método químico alternativo más específico. El método preferido para confirmación, es el GC/MS (Cromatografía gaseosa/Espectrometría). La consideración clínica y el buen juicio profesional deben aplicarse a cualquier resultado de test de drogas de abuso, en particular cuando se utilizan resultados preliminares positivos.

Resultados en sólo 5 minutos.

[button

link="https://akralab.es/wp-content/uploads/2024/07/IFU-test-tiras-cocaina-akratest.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Descargar IFU Test Tiras Cocaína Akratest[/button]

Principio

Prueba Rápida COC en Tira un inmunoensayo cromatográfico rápido basado en el principio de uniones competitivas. La droga que puede estar presentes en la muestra de orina, compete frente al conjugado de la misma en los puntos de unión al anticuerpo. Durante la prueba, la muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Si la benzoilecgonina está presente en la orina en concentración inferior a 300 ng/mL, no saturará los puntos de unión de los anticuerpos. Las partículas recubiertas de anticuerpos serán capturadas por el conjugado inmovilizado de benzoilecgonina y una línea visible de color aparecerá en la zona de la prueba. Esta línea de color no se formará en la zona de la prueba si el nivel de Benzoilecgonina está por encima de 300 ng/mL porque saturará todos los puntos de

unión de los anticuerpos. Una muestra de orina positiva no generará una línea coloreada en la zona de la prueba debido a la competencia de la droga, mientras que una muestra de orina negativa o una muestra con una concentración inferior a la del cut-off generará una línea en la zona de la prueba. Para servir como procedimiento de control, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control si la prueba ha sido realizada correctamente y con un volumen adecuado de muestra.

Materiales incluidos en el kit

- Pruebas en tiras
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

SKU: 237517101005

Categories: Drogas, Test Rápidos

Tags: akratest cocaína, test tira cocaína akratest, test tiras cocaína