

TEST COCAÍNA 100 NG/ML EN ORINA, CASETE

42,08€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida de membrana para la detección cualitativa del metabolito de la cocaína en la orina humana, con una concentración de corte de 100 ng/mL.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

SKU: 265617DCO102

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba Rápida de COC en casete, es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del metabolito de la cocaína, la benzoilecgonina, en la orina humana a una concentración de corte de 100 ng/ml. Esta prueba detectará otros compuestos relacionados, consulte la tabla de especificidad analítica en el IFU.

Este ensayo proporciona sólo un resultado preliminar de prueba analítica. Se debe usar un método

químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) es el método de confirmación preferido. La consideración clínica y el juicio profesional se deben aplicar a cualquier resultado de prueba de drogas de abuso, particularmente cuando se usan resultados positivos preliminares.

[Descargar IFU Test Cocaína Akratest](#)

Principio

La Prueba Rápida de COC en casete (Orina) es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Los fármacos que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten contra el conjugado de fármaco por sitios de unión en el anticuerpo. Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La benzoilecgonina, si está presente en la muestra de orina por debajo de 100 ng/ml, no saturará los sitios de unión del anticuerpo en la prueba. Las partículas recubiertas de anticuerpo serán capturadas por conjugado de benzoilecgonina inmovilizado y aparecerá una línea de color visible en la región de la línea de prueba. La línea coloreada no se formará en la región de la línea de prueba si el nivel de benzoilecgonina es superior a 100 ng/ml porque saturará todos los sitios de unión de los anticuerpos.

Una muestra de orina positiva no generará una línea coloreada en la región de la línea de prueba debido a la competencia de drogas, mientras que una muestra de orina negativa o una muestra que contenga una concentración menor a la del límite generará una línea en la línea de prueba. región. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea coloreada en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen apropiado de la muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

Materiales Suministrados

- Pruebas en casete
- Cuentagotas
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST COCAÍNA AKRATEST](#)