

TEST DE GRAHAM SAFE & CLEAN



Portaobjetos listos para usar para la detección de *Enterobius vermicularis*.


Presentación: 60 cajas rígidas con 3 portaobjetos cada una, incluye capuchones.

SKU: 203217RPTGSF

Categorías: [Microbiología](#), [Recogida y transporte de muestras](#)

Etiquetas: [test-de-graham](#), [test-graham](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

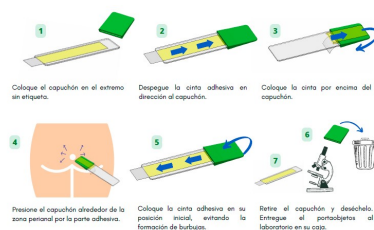

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El REAL Test de Graham Safe & Clean es una solución para la detección de *Enterobius vermicularis*. Está constituido por un portaobjetos con cinta adhesiva listo para usar que permite una recogida fácil y eficiente.

Fabricado con vidrio de la máxima calidad para garantizar una visualización óptima.

El dispositivo incluye, además, un capuchón de plástico flexible que facilita la recolección, a la vez que evita el contacto directo entre la piel del paciente y el vidrio, previniendo cortes y arañazos, y disminuye la probabilidad de infección accidental durante la recogida de la muestra. Es su principal ventaja, que evita el contacto directo con la zona perianal durante la toma de la muestra, reduciendo al máximo la posibilidad de contagio e impidiendo el contacto del paciente con el portaobjetos .

Dispone de caja de plástico resistente que evita la rotura de los mismos durante el transporte.

Características técnicas

- Incorpora una pestaña para la fácil manipulación del adhesivo
- Superficie de visualización completa (sin zonas mate)
- Dimensiones: 76 x 26 x 1 mm
- Esquinas esmeriladas a 45º
- Posibilidad de personalización


Modo de empleo




akralab
one point, all solutions.

Test de Graham Safe & Clean


<https://www.akralab.es/producto/test-de-graham-safe-clean/>

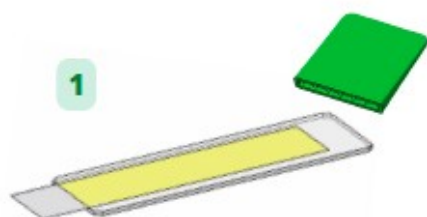

1
Coloque el capuchón en el extremo sin etiqueta.

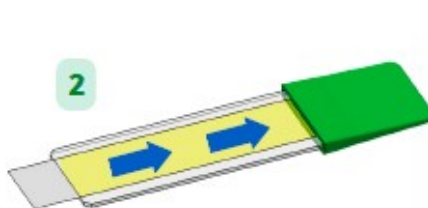


2
Despegue la cinta adhesiva en dirección al capuchón.

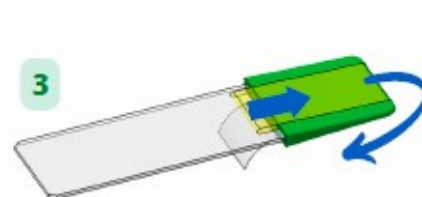

3
Coloque la cinta por encima del capuchón.



4
Presione el capuchón alrededor de la zona perianal por la parte adhesiva.

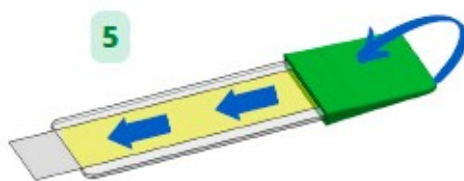

5
Coloque la cinta adhesiva en su posición inicial, evitando la formación de burbujas.



6
Retire el capuchón y deséchelo. Entregue el portaobjetos al laboratorio en su caja.

