

## TEST FENCICLIDINA 25 NG/ML EN ORINA, CASETE

**38,36€ I.V.A. no incluido**



Una prueba rápida de membrana para detectar cualitativamente los niveles de fenciclidina en orina humana con concentración de corte de 25 ng/ml.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

---

**SKU:** 265617DPC102

**Categorías:** [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba Rápida de PCP en Casete (Orina) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de fenciclidina en orina a una concentración de corte de 25 ng/ml. Esta prueba detectará otros compuestos relacionados, consulte la tabla de especificidad analítica en este prospecto. Este ensayo proporciona solo un resultado preliminar de prueba analítica. Se debe usar un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La cromatografía

de gases/espectrometría de masas (GC/MS) es el método de confirmación preferido. La consideración clínica y el juicio profesional se deben aplicar a cualquier resultado de prueba de drogas de abuso, particularmente cuando se usan resultados positivos preliminares.

## Descargar IFU Test Fenciclidina PCP Akratest

### Principio

La Prueba Rápida de PCP en Casete (Orina) es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Los fármacos que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten contra el conjugado de fármaco por sitios de unión en el anticuerpo.

Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La fenciclidina, si está presente en la muestra de orina por debajo de 25 ng/ml, no saturará los sitios de unión del anticuerpo en la prueba. Las partículas recubiertas de anticuerpo serán capturadas por el conjugado de fenciclidina inmovilizada y una línea de color visible aparecerá en la región de la línea de prueba. La línea de color no se formará en la región de la línea de prueba si el nivel de fenciclidina excede de 25 ng/ml porque saturará todos los sitios de unión de los anticuerpos anti-fenciclidina.

Una muestra de orina positiva no generará una línea coloreada en la región de la línea de prueba debido a la competencia de drogas, mientras que una muestra de orina negativa o una muestra que contenga una concentración menor a la del límite generará una línea en la línea de prueba. región. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea coloreada en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen apropiado de la muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

### Materiales Suministrados

- Pruebas en casete
- Cuentagotas
- Instrucciones de uso

### Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

## [DESCARGAR IFU TEST FENCICLIDINA AKRATEST](#)