

TEST H.PYLORI AC EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE




Test para la detección de antígenos de Helicobacter pylori Ac en sangre, suero o plasma, mediante casete

SKU: 262001

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

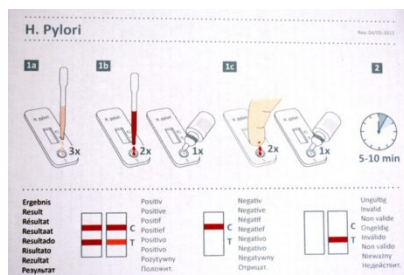

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test H.Pylori Ac es una prueba rápida e inmunológica para la determinación cualitativa de anticuerpos contra el H.pylori en sangre, suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipetas, solución y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

Se recomienda que todos los componentes del test estén a temperatura ambiente antes de empezar (15-30°C).

1) Extraiga el test cassette y la pipeta desechable del envoltorio, y deposítelo sobre una superficie limpia, plana y no absorbente

2) Realice la toma de la muestra:

- Para suero o plasma: Con la pipeta transferir una gota de suero o plasma y una gota de solución en el pocillo del test. Inicie la cuenta atrás para finalizar la prueba.

- Para muestras de sangre en vena: Mantenga la pipeta en posición vertical y transfiera las gotas de sangre y de solución tampón indicadas, en el pocillo del test. Inicie la cuenta atrás para finalizar la prueba.

- Para muestras de sangre de la yema del dedo: directamente de la yema del dedo transfiera las gotas de sangre y solución tampón indicadas que caigan de la yema en el campo de prueba del test. Iniciar la cuenta atrás para finalizar la prueba.

3) Esperar a obtener los resultados.

Resultados precisos en pocos minutos

Fácil manipulado e interpretación

Larga duración almacenamiento a temperatura ambiente

No precisa equipamiento electrónico

Alta sensibilidad y especificidad



Test H.Pylori Ac en sangre, suero o plasma, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-h-pylori-ab-en-sangre-suero-o-plasma-formato-casete/>

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud