

## TEST HEPATITIS A HVA IGM, CASETE

**113,23€ I.V.A. no incluido**



Prueba rápida para la detección cualitativa del IgM anticuerpos de virus de Hepatitis A en sangre total, suero o plasma.

Presentación: Caja 25 tests

Marca: Akratest

---

**SKU:** 265617IHA402

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO**

La Prueba Rápida de HAV IgM en Casete (Sangre Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgM del virus de Hepatitis A ( HAV ) en sangre total, suero o plasma.

El HAV es un virus de ARN positivo, un miembro único de picornaviridae. Su transmisión depende

principalmente de la transmisión de persona a persona por la ruta fecal-oral. Aunque la hepatitis A no es generalmente una enfermedad de transmisión sexual, la tasa de infección es alta entre los hombres homosexuales, como resultado del contacto oral-anal.

La Prueba Rápida de HAV IgM en Casete (Sangre Total/Suero/Plasma) se debe utilizar para detectar anticuerpos IgM contra HAV en menos de 15 minutos por personal no capacitado o con habilidades mínimas, sin equipos de laboratorio engorrosos.

## DESCARGAR IFU TEST HEPATITIS A HVA AKRATEST

### Principio

La prueba se basa en una tecnología patentada que combina los principios de la cromatografía inmune y la dinámica de fluidos. La prueba HAV IgM tiene el antígeno HAV recombinante inmovilizado en la membrana dentro de la zona de prueba. Después de que la muestra se agrega al pocillo de muestra del casete, reacciona con partículas recubiertas con IgM antihumana de ratón en la prueba. Indica un resultado positivo cuando la zona de prueba forma una línea de color, ninguna línea de color en la zona de prueba indica un resultado negativo. Para servir como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

### Materiales Suministrados

- Pruebas en Casete
- Goteros
- Buffer
- Ficha Técnica

### Materiales Requeridos no Suministrados

- Cronómetro
- Contenedores de recogida de muestras
- Centrífuga
- Para puntear con los dedos para sangre total: Lancetas, Tubos capilares heparinizados y bulbo dispensador