

TEST LEPTOSPIRA IGG/IGM EN SANGRE, SUERO O PLASMA, CASETE

39,95€ I.V.A. no incluido



Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra *Leptospira interrogans* en muestras de sangre, suero o plasma de humanos. Formato casete. Resultado visible en 15 minutos.

Presentación: Caja 40 tests

SKU: 265602LEP402

Categorías: [Marcadores de Infección/Inflamacion](#), [Test Rápidos](#)

Etiquetas: [test akratest](#), [test anticuerpos leptospira akratest](#), [test leptospira akratest](#), [test leptospira IgG-IgM](#), [test rápido leptospira anticuerpos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra *Leptospira interrogans* en muestras de sangre, suero o plasma de humanos. Formato casete.

[Descargar IFU Test anticuerpos Leptospira Akratest](#)

Principio

Leptospira IgG/IgM Prueba Rápida de Casete (Sangre Total/Suero/Plasma) es cualitativa, inmunoensayo basado en la membrana para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra Leptospira en sangre total, suero o plasma. La membrana está prerrevestida con IgG antihumana de ratón recombinante y IgM antihumana de ratón en la región de línea de prueba del casete. Durante la prueba, la muestra de sangre total, suero o plasma reacciona con oro coloidal conjugado con antígeno de Leptospira interrogans recombinante. La mezcla migra hacia arriba sobre la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con IgG antihumana de ratón y / o IgM antihumana de ratón en la membrana y generar una línea coloreada. La presencia de esta línea de color indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea coloreada en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen apropiado de la muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

El resultado es visible en 15 minutos.

Materiales Suministrados

- Pruebas en Casete
- Tubos de colección de muestra con búfer de extracción
- Puntas de goteros
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedores de colección de muestras
- Temporizador