

TEST MORFINA 300 NG/ML EN ORINA, TIRAS

46,89€ I.V.A. no incluido



Prueba rápida en tiras para la detección cualitativa de Morfina y opiáceos en orina humana, con una concentración de corte de 300 ng/mL.

Presentación: Caja 50 tests

Marca: Akratest

SKU: 237517101009

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba de Opiáceos en Tira (Orina) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de Morfina en orina en concentraciones del cut-off de 300 ng/mL. Esta prueba detecta también otros compuestos relacionados con los opiáceos, para lo que puede referirse a la relación que aparece en el apartado de Especificidad.

Esta técnica únicamente proporciona un resultado analítico preliminar cualitativo. Para obtener la

confirmación de un resultado, debe emplearse un método químico alternativo más específico. El método preferido para confirmación, es el GC/MS (Cromatografía gaseosa/Espectrometría de masas). La consideración clínica y el buen juicio profesional deben aplicarse a cualquier resultado de la prueba de drogas de abuso, en particular cuando se utilizan resultados preliminares positivos.

Descargar IFU Test Opiáceos Akratest

Principio

Opiáceo se refiere a cualquier droga derivada del opio de la amapola, incluidos los productos naturales, como la Morfina y Codeína, y las drogas semisintéticas tal como la Heroína. Por Opiáceos en general, se refiere a cualquier droga que actúa sobre los receptores de opiáceos. Los analgésicos de Opio comprenden un grupo grande de sustancias que controlan el dolor, deprimiendo el sistema nervioso central. Dosis grandes de Morfina pueden producir niveles más altos de tolerancia y dependencia fisiológica en los consumidores, y pueden llevar al abuso de la sustancia. La Morfina se elimina sin metabolizar, y es también el producto metabólico mayor de la Codeína y la Heroína. La Morfina es perceptible en la orina varios días después de una dosis de opiáceos. La Prueba de Opiáceos en Tira (Orina) puede realizarse sin necesidad de ningún instrumento. Utiliza anticuerpos para detectar de manera selectiva niveles elevados de Morfina en orina, dando un resultado positivo cuando la Morfina en la orina excede 300 ng/mL. Esto es el nivel del cut-off que se establece para muestras positivas a través del Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, USA).

Materiales Suministrados

- Pruebas en tiras
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST MORFINA Y OPIÁCEOS AKRATEST](#)