

TEST MORFINA 300 NG/ML EN ORINA, CASETE

23,00€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida de membrana para detectar cualitativamente los niveles de morfina y otros opiáceos en orina humana con concentración mínima de 300 ng/mL.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

SKU: 265617DMO102

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El casete de prueba rápida para MOP es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de Morfina en orina humana a la concentración de corte de 300 ng/mL. Esta prueba detectará otros compuestos, consulte la tabla de especificidad analítica en el IFU más abajo.

Este ensayo proporciona sólo un resultado cualitativo, preliminar y analítico. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La

cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) es el método confirmatorio preferido. La consideración clínica y el juicio profesional deben aplicarse a cualquier droga de resultado de la prueba de abuso, particularmente cuando se usan resultados positivos preliminares.

Descargar IFU Test Morfina Akratest

Principio

El casete de Prueba Rápido para MOP es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Los fármacos que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten contra el conjugado de fármaco para sitios de unión en el anticuerpo. Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La morfina, si está presente en la muestra de orina por debajo de 300 ng/mL, no saturará los sitios de unión de las partículas recubiertas de anticuerpo en el dispositivo de ensayo. Las partículas recubiertas de anticuerpo se capturan entonces por conjugado de Morfina inmovilizado y una línea de color visible aparecerá en la región de la línea de prueba. La línea coloreada no se formará en la región de la línea de prueba si el nivel de Morfina está en o por encima de 300 ng/mL porque saturará todos los sitios de unión de anticuerpos anti-Morfina. Una muestra de orina con fármaco positivo no generará una línea coloreada en la región de la línea de prueba debido a la competencia de fármacos, mientras que una muestra de orina negativa a fármaco o una muestra que contiene una concentración de fármaco menor que el límite generará una línea en la región de ensayo. Para servir como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea coloreada en la región de la línea de control indicando que se ha añadido el volumen apropiado de espécimen y se ha producido la absorción de la membrana.

Materiales Suministrados

- Pruebas en casete
- Cuentagotas
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST MORFINA AKRATEST](#)