

TEST PHADEBACT PNEUMOCOCCUS LÁTEX

258,85€ I.V.A. no incluido



Test de látex para la detección de Streptococcus pneumoniae en suero

SKU: 105576

Categorías: [Microbiología](#), [Reactivos e identificación](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Phadebact® Pneumococcus es una prueba de aglutinación de látex para detectar Streptococcus pneumoniae en suero humano.

Contenido: 1 vial Pneumococcal Reagent (con Anticuerpos específicos desarrollados en conejo, acoplados a estafilococos no viables), y 1 vial Pneumococcal Control (con Gamaglobulina de conejo no inmunizado ligada a estafilococos no viables)

Listo para usar. Solo para uso profesional y diagnóstico in vitro

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de aglutinación de látex sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

1. Marque los círculos de la tarjeta de pruebas, las de control y las muestras que vaya a utilizar.
2. Colecte las colonias de la placa con un asa de inoculación o equivalente, y frote las colonias suave y completamente en los correspondientes óvalos marcados en el porta.
3. Ponga una gota del reactivo y una del control en los correspondientes óvalos marcados.
4. Mezcle las gotas suave y completamente con un asa de inoculación o equivalente. Use un asa nueva para cada reactivo.
5. Balancée el porta y observe los resultados en 1 minuto, contrastando el resultado con la información de referencia.

Recomendaciones:

- La fecha de caducidad indicada en la etiqueta exterior y en los viales.
- Almacenar entre 2-8°C.
- Los reactivos no deben congelarse.

PRESENTACIÓN

Presentación: El test contiene reactivos en cantidad suficiente para efectuar 50 determinaciones. Los reactivos son de color azul (azul de metileno) para facilitar la interpretación de los resultados.

Unidades: 50 ud