


TEST RÁPIDO COVID19 DE ANTICUERPOS IGG/IGM

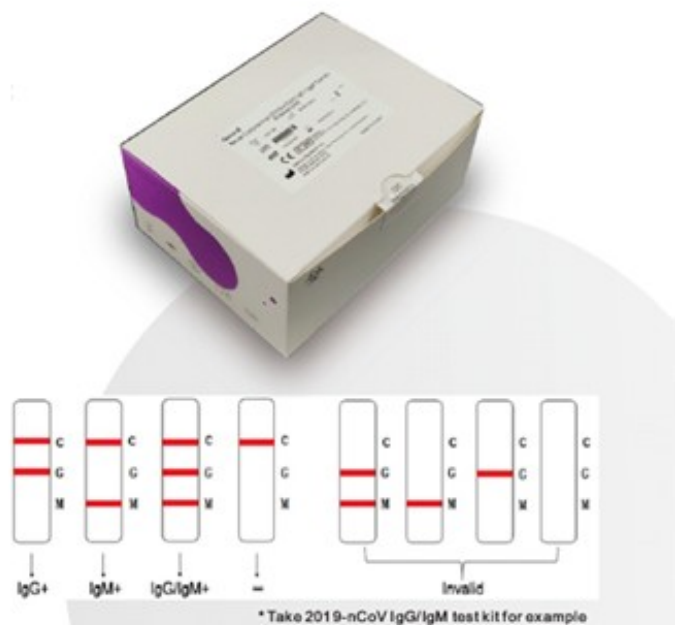

Test Rápido Casete para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM de 2019-nCoV o COVIN-19. [Validado por el Servicio Balear de Salud](#)

SKU: 52026069

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL IN VITRO

Prueba rápida para la detección cualitativa de IgG e IgM para **2019-nCov** o **COVID-19** en humanos, en sangre total, plasma o suero. Para pacientes con casos sospechosos de agrupamiento y otros casos de neumonía por Coronavirus que necesitan ser identificados.

Test de alta precisión para realizar en casete para muestra de sangre total, suero o plasma.

Características

- Pruebas cualitativas con mínima interferencia.
- 25 Tests con bolsa individual para cada prueba
- Sangre total, suero y plasma
- Bajo volumen de muestra (W.B.20uL, S / P 10uL)
- Resultados rápidos en 15 minutos.

Cómo realizar el test rápido coronavirus

Lleve la muestra y los componentes de prueba a temperatura ambiente.

Retire el casete de prueba de la bolsa de embalaje y colóquela sobre una superficie seca.

Para muestra de sangre total:

1. Tome 20 μ L de muestras de sangre completa y agréguelas a la muestra y agregue 4 gotas (aproximadamente 100 μ L) de solución diluyente, verticalmente.

Para muestra de Plasma o suero:

1. Tome 10 μ L de muestras de suero o plasma y agréguelas a la muestra y agregue verticalmente 4 gotas (aproximadamente 100 μ L) de muestra diluida.

Después de agregar la muestra, la muestra positiva se puede detectar en 15 minutos. El experimento confirma que el tiempo de reacción (calculado después de agregar la muestra) superior a ese plazo afectará la observación de los resultados de la prueba. Por lo tanto, se recomienda que los resultados finales de la prueba se registren y se registren en 15 minutos.



akralab
one point, all solutions.

Test Rápido COVID19 de Anticuerpos IgG/IgM
<https://www.akralab.es/producto/test-rapido-covid19-anticuerpos-igg-igm/>