

## TEST TRICHOMONAS VAGINALIS POR FROTIS VAGINAL, FORMATO CASETE



Test rápido para la detección de Trichomonas vaginalis por secreción vaginal, formato casete

**SKU:** 840003N-10

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido Trichomonas vaginalis es una prueba inmunocromatográfica para la detección del parásito Trichomonas vaginalis, por secreción vaginal mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contenido: 10 tests casete con pipeta desechable, 10 hisopos estériles, 10 tubos extracción, 1 buffer de extracción y manual de instrucciones de uso.

Especialmente indicado para uso profesional y diagnóstico in vitro.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

1. Tomar la muestra mediante el hisopo suministrado e introducirlo en el tubo de extracción con la cantidad de solución buffer indicada.
2. Retirar el casete de su envoltorio y depositarlo en un lugar limpio y seco.
3. Añadir las gotas indicadas de la muestra del tubo de extracción en el pocillo del casete.
4. Comprobar los resultados pasados unos minutos.

Resultados precisos en pocos minutos

Fácil manipulado e interpretación

Sencilla recolección de la muestra utilizando un hisopo

Larga duración almacenamiento a temperatura ambiente

No precisa equipamiento electrónico

Alta sensibilidad y especificidad

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud