

TEST TTG ENFERMEDAD CELÍACA EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test rápido para detección de enfermedades Celiaca y Gliadinas en sangre, suero o plasma, formato casete

SKU: 790004

Categorías: [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias, Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido tTG Enfermedad Celíaca es una prueba para la detección de anticuerpos de la enfermedad celiaca y Gliadinas en sangre, suero o plasma, formato casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 10 Test casete, 10 lancetas estériles, 10 pipetas recogida, 1 buffer dilución y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

Se recomienda que todos los componentes del test estén a temperatura ambiente antes de empezar (15-30°C).

- 1) Extraiga el test cassette y la pipeta desechable del envoltorio, y deposítelo sobre una superficie limpia, plana y no absorbente
- 2) Realice la toma de la muestra:
 - Para suero o plasma: Con la pipeta transferir las gota de suero o plasma y de solución indicadas en el pocillo del test. Inicie la cuenta atrás para finalizar la prueba.
 - Para muestras de sangre en vena: Mantenga la pipeta en posición vertical y transfiera las gotas de sangre y de solución tampón indicadas, en el pocillo del test. Inicie la cuenta atrás para finalizar la prueba.
 - Para muestras de sangre de la yema del dedo: directamente de la yema del dedo transfiera las gotas de sangre y solución tampón indicadas que caigan de la yema en el campo de prueba del test. Iniciar la cuenta atrás para finalizar la prueba.
- 3) Esperar a obtener los resultados.

Resultados precisos en pocos minutos

Fácil manipulado e interpretación

Larga duración almacenamiento a temperatura ambiente

No precisa equipamiento electrónico

Alta sensibilidad y especificidad

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud