

COVID-19 Ag

Microfluidic Qualitative Immunoassay



Fast result



Easy to use



Monitoring




El **FREND™ COVID-19 Ag** es un inmunoensayo de fluorescencia (FIA) para su uso con el sistema FREND™. Está diseñado para la detección cualitativa de la **proteína nucleocapsulada del SARS-CoV-2** directamente a partir de muestras de un hisopo nasofaríngeo directamente de individuos sospechosos de COVID-19 por su facultativo médico.

01



more than
10 times

02

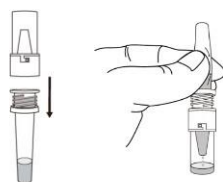

03



35 µl

04




Coloque una muestra de hisopo en un tubo de lisis y remueva bien más de 10 veces

Cierre el tubo de lisis firmemente con un gotero de filtro. A continuación, invierta el tubo y apriete suavemente para liberar la muestra.

Tome una muestra de 35 microlitros e introduzca en el cartucho

Inserte el cartucho y obtenga el resultado en un plazo de 3 min

Conectividad del sistema de información de laboratorio

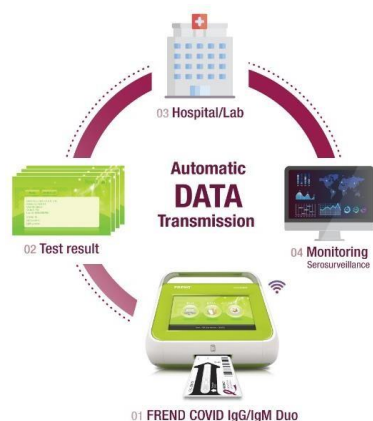

En caso de pandemia, el manejo de una gran cantidad de resultados clínicos es importante. Sin embargo, muchos laboratorios se enfrentan al desafío de organizar eficazmente la información esencial⁽¹⁾.

- Sin papeles
- Ahorro de tiempo
- Transferencia y recopilación automática de datos
- Manager de datos convenientemente
- Puede ayudar en el rastreo

El total de 109 muestras clínicas (34 positivas y 75 negativas) confirmadas con RT-PCR fueron probadas con el FRENDS™ COVID-19 Ag. Mostró un 94.12% PPA (Acuerdo de Porcentaje Positivo) y 100.00% NPA (Acuerdo porcentual Negativo) como se muestra a continuación.

Method		Clinical Confirmation Sample	
		Positive	Negative
FRENDS™ COVID-19 Ag	Positive	32	0
	Negative	2	75
Total		34	75

Positive Percent Agreement: 94.12% (32/34)

Negative Percent Agreement: 100.00% (75/75)

Componentes

No.	Contenido
1	Cartuchos FRENDS™ COVID-19 Ag
2	Tubos de lisis
3	Gotero de filtro con una taza de muestra.
4	Puntas de pipeta desechables
5	Hisopo nasofaríngeo desechable
6	COVID-19 Ag Hisopo de control positivo
7	COVID-19 Ag Hisopo de control negativo
8	Chip de código
9	Packaging del kit

Información para pedidos

Artículo	Ref.
Sistema Frends™	F10
Frends™ COVID-19 Ag	FRCOG

Especificación

Artículo	Especificación
Espécimen	Nasofaríngeo
Tiempo para resultados	<3 min
Volumen muestra	35 microlitros

Productos relacionados



COVID-19 RT-PCR Kit

Diagnóstico molecular
Ensayo RT-PCR en tiempo real



COVID-19 IgG/IgM Duo

Diagnóstico de anticuerpos
Prueba cualitativa/cuantitativa para COVID-19 IgG/IgM (proteína núcleo encapsulada)



COVID-19 SP

Diagnóstico de anticuerpos
Prueba cualitativa para COVID-19 IgG/IgM (Proteína corona)

Distribuye: